

## Häufige Fragen zur HarmonieSchiene<sup>®</sup> von Orthos

### Geht das bei mir/bei jedem?

Die HarmonieSchiene ist speziell für Frontzahnkorrekturen und nicht für jede Zahnfehlstellung geeignet. Dein Zahnarzt schickt uns eine Abformung oder ein digitales Bild deiner Zähne. Wir vermessen dieses und prüfen, ob eine Therapie mit der HarmonieSchiene möglich ist, und erstellen dir ein individuelles **AFISL** = Angebot für Ihr schönstes Lächeln. Auf Wunsch oder bei komplexen Fällen fertigen wir ein digitales HarmonieBild, eine 3D-Simulation oder ein HarmonieModell zum Anfassen an, das dir zeigt, wie deine Zähne nach der Behandlung aussehen werden.

### Wie viel kostet die Behandlung und wie lange dauert sie?

Dies kommt auf die Zahnfehlstellung an. Im Durchschnitt dauert die Behandlung 3 bis 6 Monate. Wie lange es bei dir dauert und welcher Paketpreis für deine Zahnfehlstellung passend ist, siehst du in deinem **AFISL** = Angebot für dein schönstes Lächeln, den dein Zahnarzt mit dir bespricht. Danach kannst du dich in Ruhe entscheiden.

### Wie lange müssen die Schienen pro Tag getragen werden?

Wichtig: Die Schienen müssen 24 Stunden getragen werden, außer zum Essen und Zähneputzen.

### Woraus bestehen die Schienen?

Die durchsichtige, flexible Korrekturschiene ist eine Spezialschiene aus einem medizinischen PET (Polyethylenterephthalat)/PU (Polyurethane). Das Material enthält keine Weichmacher, ist also frei von Bisphenol A (BPA). Wichtig für Allergiker.

### Wo wird die HarmonieSchiene hergestellt?

Die HarmonieSchiene wurde vom Orthos Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt/Nieder-Eschbach und Weimar entwickelt und wird ausschließlich an diesen Standorten in Deutschland hergestellt. Das Fachlabor verfügt seit 1983 über Erfahrung in der Herstellung kieferorthopädischer Geräte.

### Seit wann gibt es die HarmonieSchiene von Orthos?

2004 wurde die HarmonieSchiene vom Fachlabor Orthos entwickelt und seitdem immer weiter verbessert. Über 26.000 Patienten hat die HarmonieSchiene von Orthos bereits zu einem schöneren Lächeln verholfen. Mehr als 5.000 Zahnärzte in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten mit dem System von Orthos.

### Wie werden die Schienen gereinigt?

Einfach mit der Zahnbürste und Zahncreme mit kaltem, maximal lauwarmen Wasser. Auf keinen Fall mit heißem Wasser, denn Hitze verformt die Schienen und verändert dadurch die Wirkung.

## Hier geht's weiter...

### **Kann ich mit der Schiene Essen/Trinken/Rauchen/Kaugummi kauen?**

Während die Schiene im Mund ist, solltest du nicht rauchen und auch nichts essen. Lebensmittel mit hohem Zucker- oder Säuregehalt wie Limonaden, Säfte, Bonbons etc. bitte unbedingt meiden. Die Selbstreinigung deiner Zähne durch den Speichel wird nämlich vermindert, wenn die Schiene auf deinen Zähnen sitzt. Zum Essen also: Schiene raus! Du erhältst von uns die schicke **HarmonieSchiene-Dose**, in der deine Schienen z. B. beim Restaurantbesuch „verschwinden“.

### **Ist die Zahnkorrektur schmerzhaft?**

Um die Zähne in die gewünschte Position zu bewegen, müssen die Schienen Druck auf die Zähne ausüben. Daher kann beim Einsetzen einer neuen Schiene Druckschmerz entstehen, besonders beim Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Schiene (vor dem Essen oder zur Zahnpflege), den manche Patienten mit einem starken Muskelkater vergleichen. Nach ein, zwei Tagen gibt sich das aber.

### **Kann man gleichzeitig bleachen, also die Zähne aufhellen?**

Nein. Ein Bleaching sollte vor oder erst nach der Behandlung erfolgen.

### **Zahlt das die Krankenkasse?**

Gesetzliche Krankenkassen zahlen diese Leistung nicht, da es sich um eine kosmetische Korrektur handelt. Private Krankenversicherungen übernehmen je nach Vertrag die Kosten der Behandlung.

### **Besteht die Möglichkeit der Ratenzahlung oder Finanzierung?**

Die Zahlungsmöglichkeiten kannst du mit deinem behandelnden Zahnarzt besprechen, da die Zahnarztpraxis dein Vertragspartner ist und nicht wir, das Labor. Viele Praxen bieten heutzutage Ratenzahlung an. Einfach nachfragen!

### **Zu welchem Zahnarzt kann ich gehen/Zahnarzt in meiner Nähe?**

Das "System HarmonieSchiene" wurde von uns speziell für die allgemeine Zahnarztpraxis entwickelt. Mach einen Termin und frag deinen Zahnarzt nach der Behandlung mit der HarmonieSchiene von Orthos. Du kannst einfach unsere „Kurze Information für Behandler“ herunterladen und mit zu dem Termin nehmen. Gerne schicken wir der Praxis auch unser "Starterpaket" zu. Über unsere Zahnartztsuche gibst du einfach deine Postleitzahl ein und findest einen Zahnarzt in deiner Nähe.

## **Viel Erfolg auf Deinem Weg zu schönen, geraden Zähnen wünschen**

Wir von Orthos

Dein HarmonieSchiene-Team vom Fachlabor Orthos