



Eine kurze Information für Praxisteams

Die HarmonieSchiene® von Orthos – unsichtbare Zahnsperre

Die transparenten HarmonieSchiene wurden vom Fachlabor Orthos entwickelt, das seit 1983 Erfahrung in der Fertigung kieferorthopädischer Geräte hat. Hergestellt werden die Schienen an den zwei Laborstandorten Frankfurt am Main/Nieder-Eschbach und Weimar in Thüringen. Das seit 2004 erprobte und kontinuierlich weiterentwickelte Schienen-System ist geeignet für die Korrektur von kleinen bis mittleren Fehlstellungen der Zähne. Eine spezielle Software oder Zertifizierung für Behandler*innen ist nicht erforderlich.

So wirkt die Korrekturschiene

Die durchsichtige, flexible Korrekturschiene ist eine Spezialschiene aus einem Spezialkunststoff. **BioForcePro®** - das neue exklusive Schienenmaterial der HarmonieSchiene sorgt für eine konstant gleichbleibende Kraftübertragung auf die Zähne während der gesamten Tragezeit. Der Tragekomfort wird durch die jetzt noch feineren und leichteren Schienen optimiert. Das Material enthält keine Weichmacher, ist also frei von Bisphenol A (BPA). Wichtig für Allergiker.

Das benötigen wir von Ihnen

Sie schicken uns exakte permanente Abformungen, Klasse-3-Hartgipsmodelle oder Intraoral-Scans der Patient*innen. Nach Vermessung der Modelle setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung und besprechen das Behandlungsziel, die Machbarkeit oder eventuelle Alternativen. Daraufhin erstellen wir ein kostenfreies, unverbindliches „AFISL - Angebot für Ihr schönstes Lächeln“ für Ihre Patient*innen, in dem der passende Paketpreis und das genaue Vorgehen beschrieben werden. Darin ist das geplante Ergebnis über einen QR-Code virtuell als Animation bereits zu sehen. Der Plan dient als Gesprächsunterlage für Sie. Ihre Patient*innen entscheiden sich danach in aller Ruhe.

Dann kann es losgehen

Anhand der Modelle wird die benötigte Anzahl von Schienen vom Labor gefertigt. Die Schienen übertragen Schritt für Schritt das gewünschte Ergebnis auf die Zähne. Attachments, die mit eingeplant werden, verstärken die Wirkung. Sie erhalten den durchnummerierten Satz an HarmonieSchiene und bestellen die Patient*innen zu jedem Schienenwechsel ein. Falls ASR (Approximale Schmelzreduktion) erforderlich sein sollte, um Platz für die Bewegung der Zähne zu schaffen, erhalten Sie von uns einen ausführlichen Beschleifplan.

So lange dauert die Behandlung

Die Schienen werden alle 2 Wochen gewechselt. Außer zum Essen und zur Zahnpflege muss die HarmonieSchiene von Orthos rund um die Uhr getragen werden. Wie aufwändig die Behandlung ist und wie lange sie dauert, hängt von der individuellen Fehlstellung ab. Wichtig ist, dass Sie den Verlauf der Zahnkorrektur kontinuierlich bei Kontrollterminen überprüfen.

Sehr wichtig, um das Behandlungsergebnis zu erhalten

Um das Behandlungsergebnis dauerhaft zu sichern, gibt es zwei Möglichkeiten: das Tragen von herausnehmbaren Retainerschienen oder einen festen Klebe-Retainer. Hierfür haben wir unseren RotkäppchenRetainer® entwickelt, der von uns im Labor bereits auf dem Modell angepasst wird und mithilfe der kleinen Käppchen besonders einfach anzubringen ist. Dabei ist die Retentionszeit abhängig von der individuellen Ausgangssituation und Behandlungszeit. Unser Labor empfiehlt im Behandlungsplan bereits eine geeignete Retentionsmaßnahme.

Auf Wunsch begleitet einer unserer Dentalreferenten Ihren 1. Fall vor Ort!

Für Fragen erreichen Sie unser Service-Center: +49(0)69 – 71 91 00 - 47



ORTHOS Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG

Berner Straße 23
60437 Frankfurt/Nieder-Eschbach
Tel. 069 – 71 91 00 0
info@orthos.de / info@harmonieschiene.de

Über der Nonnenwiese 7
99428 Weimar
Tel. 03643 – 80 80 0



ORTHOS AG

Rathausstrasse 14
CH-6341 Baar
Tel. +41(0)41-500 64 88
info@orthos-ag.ch



ORTHOS AG GmbH

Am Rosendorn 17A
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +42(0)2236-38 42 32
info@orthos-autria.at

www.orthos.de www.harmonieschiene.de/.ch/.at www.schlafharmonie.de

Nutzen Sie unseren Live-Chat per WhatsApp: +49(0)151 - 421 36 800

- Senden Sie uns per WhatsApp Bilder von der Zahnsituation Ihrer Patient*innen. Bitte nennen Sie dabei unbedingt Ihren Praxisnamen!
(Aus Datenschutzgründen bitte nicht den Patient*innen-Namen nennen!)
- Wir nehmen eine erste Einschätzung vor, ob der Fall mit der HarmonieSchiene behandelt werden kann.
- Dieser Service für Zahnarztpraxen während der üblichen Laborzeiten ersetzt keine Diagnostik anhand von Modellen!