

Eine kurze Information für Behandler

HarmonieSchiene® von Orthos: unsichtbare Zahnsperre

Die transparenten HarmonieSchiene wurden vom Fachlabor Orthos entwickelt, das über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Fertigung kieferorthopädischer Geräte verfügt. Hergestellt werden die Schienen im Labor in Frankfurt/Nieder-Eschbach sowie in der Niederlassung in Weimar in Thüringen. Das seit 2004 angebotene System ist geeignet für die Korrektur von kleinen bis mittleren Fehlstellungen der Frontzähne bei Erwachsenen. Eine spezielle Software oder Zertifizierung für den Behandler ist nicht erforderlich.

So wirkt die Korrekturschiene

Die ca. 1mm-starken Schienen bestehen aus einem speziellen Zweikomponenten-Verbundmaterial, was eine optimale Wirkungsweise garantiert: Eine innere weiche Schicht überträgt die Bewegungen sanft auf die Zähne, die äußere, feste Schicht sorgt für die ausreichende Stabilität.

Das benötigen wir von Ihnen

Sie schicken uns exakte permanente Abformungen oder Klasse-3-Hartgipsmodelle oder Intraoral-Scans des Patienten. Nach Vermessung der Modelle setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung und besprechen das Behandlungsziel, die Machbarkeit oder eventuelle Alternativen. Auf Wunsch können Zielmodelle (auf Papier, aus Kunststoff oder virtuell) angefertigt werden. Daraufhin erstellen wir einen kostenlosen „HarmoniePlan“ für Ihren Patienten, in dem die Behandlungsdauer, die Kosten, die Dauer und das genaue Vorgehen beschrieben werden. Dieser dient als Gesprächsunterlage für Sie. Ihr Patient kann sich danach in Ruhe entscheiden.

Dann kann es losgehen

Anhand der Modelle wird die benötigte Anzahl von Schienen vom Labor gefertigt. Die Schienen übertragen Schritt für Schritt das gewünschte Ergebnis auf die Zähne. Es sind keine weiteren Maßnahmen zur Aktivierung der Schienen in der Praxis notwendig. Sie, als Behandler, erhalten den durchnummerierten Satz an HarmonieSchiene. Ferner senden wir Ihnen einen entsprechenden Beschleifplan, falls approximale Schmelzreduktion erforderlich sein sollte, um Platz für die Bewegung der Zähne zu schaffen.

So lange dauert die Behandlung

Die erste Schiene wird 3 Wochen lang getragen. Anschließend werden die Schienen in der Regel alle 2 Wochen gewechselt. Außer zum Essen und zur Zahnpflege muss die HarmonieSchiene von Orthos rund um die Uhr getragen werden. Wie viele Schienen benötigt werden und wie lange die Behandlung dauert, hängt von der individuellen Fehlstellung ab.

Wichtig, um das Behandlungsergebnis erhalten

Um das Behandlungsergebnis dauerhaft zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten: Die Dauerretention durch das Tragen von herausnehmbaren Schienen oder einen festen Retainer. In einigen Fällen ist es angeraten, beide Maßnahmen zu kombinieren. Dabei ist die Retentionszeit abhängig von der individuellen Ausgangssituation und Behandlungszeit. Das Labor empfiehlt eine geeignete Retentionsmaßnahme.

Und so erreichen Sie uns:

ORTHOS Fachlabor für Kieferorthopädie GmbH & Co. KG

Berner Straße 23
60437 Frankfurt/Nieder-Eschbach

Tel. 069 – 71 91 00 0

info@harmonieschiene.de
www.harmonieschiene.de

info@orthos.de
www.orthos.de

Über der Nonnenwiese 7
99428 Weimar

Tel. 03643 – 80 80 0

TIPP: Nutzen Sie einfach unseren direkten Service!

Live-Chat per WhatsApp: +49(0)151 - 421 36 800

- Sie senden uns per WhatsApp Bilder von der Zahnsituation Ihres Patienten – bitte unbedingt mit Ihrem Praxisnamen!
- Wir nehmen eine erste Einschätzung vor, ob der Fall mit der HarmonieSchiene behandelt werden kann.
- Dieser Service für Zahnarztpraxen während der üblichen Laborzeiten ersetzt keine Diagnostik anhand von Modellen!